

Gebrauchsinformation für chirurgische Instrumente

Wichtige Information, vor Gebrauch durchlesen!

Achtung:

Unsachgemäße Handhabung und Pflege sowie zweckentfremdeter Gebrauch können zu vorzeitigem Verschleiß der Produkte führen.

Produkte sind bei Auslieferung nicht sterilisiert!

Ersteinsatz neuer Instrumente:

Alle Instrumente werden unsteril ausgeliefert und sind vom Anwender vor Gebrauch zu reinigen und zu sterilisieren.

Durchsicht & Funktionsprüfung:

Jedes Produkt ist vor jedem Gebrauch auf Brüche, Risse, Verbiegungen und Funktionstüchtigkeit zu untersuchen. Besonders sorgfältig sind Bereiche wie Schneiden, Spitzen, Schlüsse, Sperren, Rasten und alle beweglichen Teile zu prüfen.

Verschleißteile (z.B. Schläuche, Messer usw.) müssen ebenfalls geprüft werden. Wurde das Produkt zerlegt, ist nach dem Zusammenbau auf einwandfreie Funktion und festen Sitz aller Schrauben zu achten.

Reinigung & Pflege:

Jedes Produkt muß unmittelbar nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden, wobei besonders auf Schlitz, Sperren, Gelenke und andere schwer zugängliche Bereiche geachtet werden muß.

Als letzter Spülgang ist mit demineralisiertem Wasser gründlich zu spülen. Zerlegbare Produkte sind immer im zerlegten Zustand zu reinigen.

Nach Reinigung und Trocknung ist das Produkt umgehend zu trocknen.

Alle Produkte sind nach Reinigung und vor dem Sterilisieren mit einem geeignetem und physiologisch unbedenklichem Öl zu pflegen. Beachten Sie auch hier besonders Bereiche wie Schneiden, Schlüsse, Sperren, Gelenke, Rasten und andere bewegliche Teile.

Als Sterilisationsverfahren empfehlen wir die "Dampfsterilisation".

Die DIN 100 (Anhang / Instrumenten-Aufbereitung richtig gemacht) dient als Anhalt.

Handhabung:

Behandeln Sie alle Produkte mit der nötigen Sorgfalt. Treffen Sie Maßnahmen zum Schutz vor Beschädigung bei Transport, Reinigung, Pflege, Sterilisation und Lagerung. Produkte korrodieren und werden in ihrer Funktion beeinträchtigt, wenn sie mit aggressiven Stoffen in Berührung kommen. Setzen Sie die Instrumente nicht scharfen Reinigern oder Säuren aus.

Unsachgemäßer Umgang führt zum Ausschluß jeglicher Gewährleistung